



M2

#19379/-1

ZH

繁體中文 涉及 M2 LC 的附錄 (大切口) 吸環

說明

M2 LC-1 吸環 #19379/-1 是現存標準 M2 吸環 #19325/XX

的補充。它允許外科醫生切出相比使用標準環獲得的那些角膜瓣，直徑更大的角膜瓣。

標準切環和大切環以相同方式使用。因此 M2 LC-1 吸環既相容於 M2 (可複用) 刀頭，又相容於 M2SU (一次性使用) 刀頭。

欲瞭解更多關於裝配、維護、滅菌等資訊，請參閱 Moria 網站上可獲得的最新版 M2 使用手冊 #65013 : www.moria-surgical.com (用戶俱樂部標題)。

性能

用 M2 LC-1 吸環獲得的角膜瓣直徑比採用標準 -1 M2 吸環對相同眼獲得的角膜瓣直徑大 0.5 mm。

適應症

Moria 不建議對最陡角膜曲率量值大於 44.5 D 的角膜使用 M2 LC-1 吸環。

列線圖

相比 -1 M2 吸環，M2 LC-1 吸環不需要專用止動調節；參見提示性列線圖。

涉及列線圖的提醒

Moria 提供的列線圖僅是指南，並且獲得的結果可以與列線圖中提到的那些不同。多種因素影響手術結果：

- 眼內壓
- 近視度數
- 年齡
- 性別
- 族群
- 角膜水化狀態
- 抽吸時間
- 術前形貌
- 外科技術

Moria 強烈建議外科醫生基於分析其術後資料，編制自身列線圖。

To obtain more information

MORIA SA
15, rue Georges Besse
92160 Antony
FRANCE
Phone: +33 (0)1 46 74 46 74
Fax: +33 (0)1 46 74 46 00
www.moria-surgical.com



MORIA Inc
1050 Cross Keys Drive
Doylestown, PA 18902
USA
Phone: (800) 441 1314
Fax: +1 (215) 230 7670
www.moria-surgical.com

Moria Japan K.K.
Arcadia Building 6F
1-12-3 Kanda
SudachoChiyoda-Ku Tokyo
101-0041
JAPAN
Phone: 81-3-6260-8309
Fax: 81-3-6260-8310
www.moriajapan.com

**Moria Commercial
(CHINA) CO., LTD.**
上海目利亚贸易有限公司
Room H 6F Kaili Building NO.432
West Huai Hai Road, Changning
district, Shanghai 200052, P.R.C
中国上海市长宁区淮海西路432号凯
利大厦6楼08室
Tel/Fax: +86 021 52586095
www.moria-surgical.com

MORIA #65056ZH-TW-A-09.2020

