



繁體中文

EPI-K™ SYSTEM

#19384

#19385


- Epi-K™ 機頭（綠色）/Moteur Epi-K™ (vert)



警告/ 注意

切勿將 EPI-K™系統配套 OUP 組件使用

目次

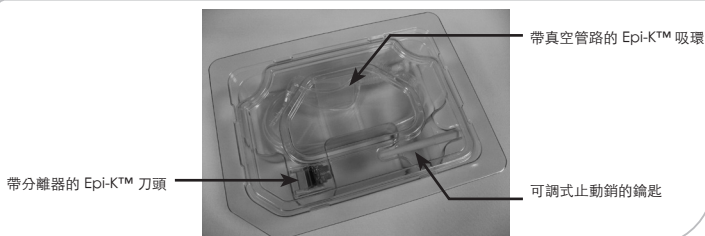


A - 將機頭裝配在刀頭上

- 1 利用打開的角，打開包裝。
- 2 /順時針擰緊鎖緊螺釘，以裝配刀頭於機頭上。核實鎖緊螺釘是否與刀頭牢固擰緊（圖片 A）。刀頭應不能移動。



A

牢固擰緊

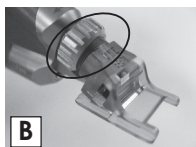


B

未牢固擰緊



警告!切勿顛倒安裝 EPI-K™刀頭（圖片 D）。

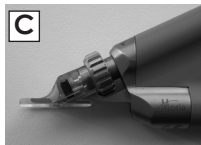

C

良好裝配





D

錯誤裝配，刀頭顛倒安裝



- 3 一旦裝配好的，顯微鏡下視檢分離器。

B - 將機頭裝配在吸環上

- 1 使用前，用平衡鹽溶液或另一種適宜的溶液潤滑吸環 (1) 和分離器 (2,3) 的導軌。
- 2 啟動馬達以檢查分離器是否恰當接合並振動。

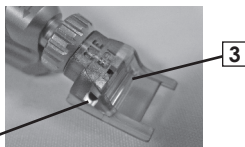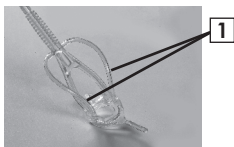

3

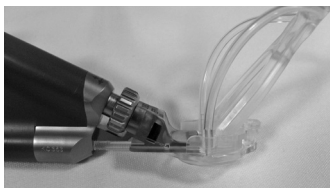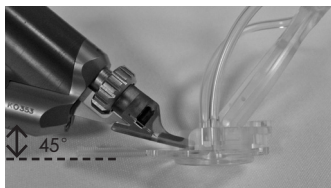


在吸環的導軌中插入刀頭時，機頭應當距吸環的金屬螺紋軸呈 45 度角，以防止軸觸碰分離器。

一旦刀頭完全插入吸環的導軌中，柔和減少 45° 角至 0° 並將刀頭略微推入吸環。

C - 手術後

拆卸刀頭和環，將它們放回泡罩包裝並且在生物危害容器中丟棄所有物品。

警告!切勿用螺紋軸觸碰分離器（如以下圖片中所示的），這將會損壞分離器。

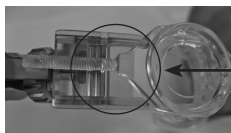

欲瞭解更多資訊，請參閱 Moria 網站上可獲得的最新版 Epi-K™ 使用手冊 #65044：www.moria-surgical.com。



切勿混用來自不同一次性使用包裝的組件（刀頭和環）。



To obtain more information

MORIA SA

15, rue Georges Besse
92160 Antony
FRANCE
Phone: +33 (0)1 46 74 46 74
Fax: +33 (0)1 46 74 46 00
www.moria-surgical.com

**MORIA Inc**

1050 Cross Keys Drive
Doylestown, PA 18902
USA
Phone: (800) 441 1314
Fax: + 1 (215) 230 7670
www.moria-surgical.com

Moria Japan K.K.

Arcadia Building 6F
1-12-3 Kanda
SudachoChiyoda-Ku Tokyo
101-0041
JAPAN
Phone: 81-3-6260-8309
Fax: 81-3-6260-8310
www.moriajapan.com

**Moria Commercial
(CHINA) CO., LTD.**

上海目利亚贸易有限公司
Room H 6F Kailli Building NO.432
West Huai Hai Road, Changning
district, Shanghai, 200052, P.R.C
中国上海市长宁区淮海西路432号凯
利大厦6楼08室
Tel/Fax: +86 021 52586095
www.moria-surgical.com