




## 帶水平儀的一次性使用散光 IOL 術前標記器使用者說明 #17249

帶水平儀的 Moria 標記器為白內障手術中術前用於確定水平子午線的位置而設計。所產標記器充當散光 IOL 定位的參考。




- 內徑 = 9 mm
- 外徑 = 14 mm
- (A): 2 個 2.5 mm 標記用刀片

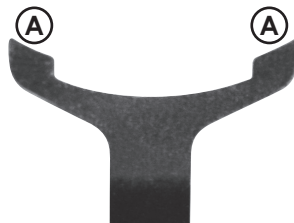

### 使用說明：

如果它已受損、洩漏或有任何大小的裂隙，切勿使用標記器。

- 1- 讓患者坐下，雙腿在正面懸垂，頭部豎直。患者必須盯住其前方的某個點。
- 2- 用適於眼手術的油墨對標記用刀片做記號。
- 3- 前移標記器至患者眼部，手柄向下；標記用刀片必須在患者的 180 度水平子午線前方。
- 4- 酌情調節標記器的取向；氣泡必須在 2 條線之間。當氣泡在標記之間時，精度在 1° 範圍內。
- 5- 標記眼部。

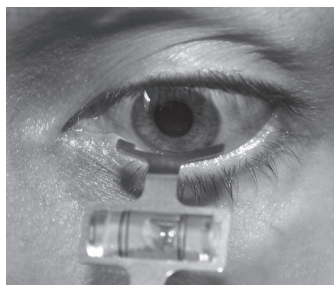

- 6- 酌情，重描用適於眼手術的筆標記所獲得的標記，從而標記保持更可見。使用後，在適當的容器處置標記器以銷毀（根據生效法規）。

MORIA #65055ZH-TW-A-09.2020

#### 欲瞭解更多資訊

**MORIA SA**  
15, rue Georges Besse  
92160 Antony  
FRANCE  
Phone: +33 (0)1 46 74 46 74  
Fax: +33 (0)1 46 74 46 00  
[www.moria-surgical.com](http://www.moria-surgical.com)



**MORIA Inc**  
1050 Cross Keys Drive  
Doylestown, PA 18902  
USA  
Phone: (800) 441 1314  
Fax: +1 (215) 230 7670  
[www.moria-surgical.com](http://www.moria-surgical.com)

**Moria Japan K.K.**  
Arcadia Building 6F  
1-12-3 Kanda  
SudachoChiyoda-Ku Tokyo  
101-0041  
JAPAN  
Phone: 81-3-6260-8309  
Fax: 81-3-6260-8310  
[www.moriajapan.com](http://www.moriajapan.com)

**Moria Commercial  
(CHINA) CO., LTD.**  
上海目利亞貿易有限公司  
Room H 6F Kaoli Building NO.432  
West Huai Hai Road, Changning  
district, Shanghai, 200052, P.R.C  
中国上海市长宁区淮海西路432号凯  
利大厦6楼08室  
Tel/Fax: +86 021 52586095  
[www.moria-surgical.com](http://www.moria-surgical.com)

