



#65087

Année de première mise sur le marché : 2011

ZH-TW


帶 OU LC 環的一次性使用人工前房 (19185) 和輸注管路套件 (19181) 的使用說明



重要提示：檢查小袋完整性以及標籤上的有效日期。本醫療器械無菌且僅為一次性使用。這些醫療器械的設計絕不允許重複使用。不應當將它們重複滅菌或重複使用。

欲選擇一次性 OU LC 刀頭的適當組合，請參閱名為 #65090* 的文檔。

可在 Moria 網站：www.moria-surgical.com（受限區域-«Library» 標題）獲得本文檔的電子版本。索取時，還可獲得單獨版本（封底上指示 Moria 的地址）。

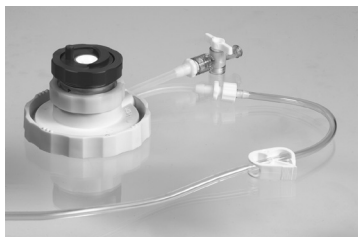

目次

19185 人工前房基座，有 2 個端口（一個端口帶單通旋塞閥）

、帶白色螺釘的前房蓋和帶藍色螺釘的 OU LC 導引環

19181 輸注管路套件，由一根帶滴注室的靜脈輸液管、擴展管路和一根帶單通旋塞閥和注射器的短管組成

短管



靜脈輸液管


* AC 用 OU LC 刀頭使用說明

從小包裝取出所有零部件。將人工前房的基座置於桌上並且確定它穩定。


準備管路在人工前房中獲得 90 mm Hg 壓力：



將短管接合至前房（結合至無旋塞閥的端口）。核實 2 個旋塞閥是否開放。

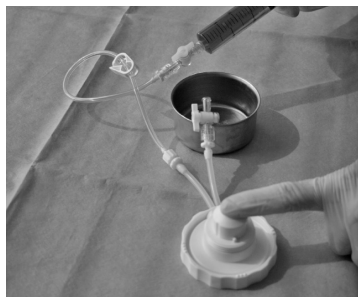

用角膜保存介質或生理溶液（BSS 或類似溶液）充填注射器。將注射器接合至短管。將一根手指置於柱塞頂端並其徹底充填管路（從短管至前房管路末端）。關閉前房旋塞閥。

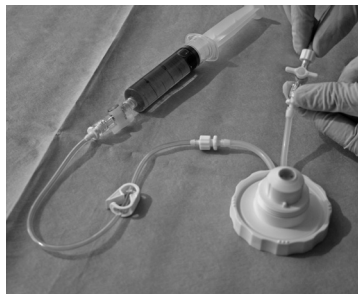

在滴注室和人工前房頂部
中的液體之間的高度：
約 1.20 m



將靜脈輸液瓶抬高到滴注室和人工前房頂部（角膜）之間的 1.20 m 高度，以確保獲得 90 mmHg 壓力。

將靜脈輸液瓶接合至靜脈輸液管。打開空氣閥。清通管路，並使用滾輪關閉系統。


確認靜脈輸液管直至前房中不存在空氣泡。

將靜脈輸液管接合至前房旋塞閥並放開靜脈輸液管的滾輪，同時保持前房旋塞閥關閉。



在人工前房上定位植片：

如果需要，向內皮施加內聚粘彈劑。

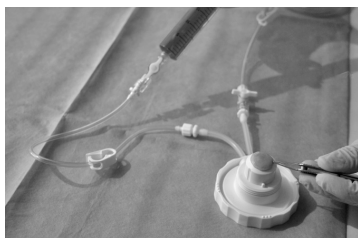

使用注射器向系統輸溫 and 注用角膜保存介質或 BSS。在柱塞的頂部定位供體植片，內皮向下。用鑷子略微提起植片，以除去可能的空氣泡。



使角膜在底座上精確居中並且將蓋小心放置就位（將銷釘插入槽中）。核實植片是否充分居中。通過在蓋上安置白色鎖緊環，密封人工前房。

打開前房旋塞閥至少三秒。隨後，關閉前房旋塞閥以維持 90 mmHg 壓力。核實 2 個旋塞閥是否關閉。

如果需要，用眼壓計檢查壓力。

90

建議：使用基質環具有 16 mm 最小直徑和角膜充分居中的植片。

供體植片切制：

主要步驟：

- 移除上皮並使角膜表面乾燥
- 測量角膜厚度
- 如果需要，用眼壓計檢查壓力
- 將 OU LC 刀頭的導引環置於蓋上並借助藍色螺釘擰緊它
- 用 ONE 渦輪和適當的 OU LC 刀頭進行切制（參見文檔 #65090）

取下植片和處置器械：

一旦切制完成，擰松導引環。

為了防止植片可能塌陷，打開前房旋塞閥，擰松白色螺釘，並且溫和地提起蓋，以握緊植片。

植片現準備好置於 Moria 穿孔器上以獲得所需的直徑。

在外科手術結束時，將一次性使用人工前房及其附件、OU LC 刀頭和一次性使用管路棄入適宜的容器以處置（根據生效法規）。

僅美國適用的警告：美國聯邦法律將本器械限於醫師銷售或訂購。

To obtain more information

MORIA SA

15, rue Georges Besse
92160 Antony
FRANCE
Phone: +33 (0)1 46 74 46 74
Fax: +33 (0)1 46 74 46 00
www.moria-surgical.com



MORIA Inc

1050 Cross Keys Drive
Doylestown, PA 18902
USA
Phone: (800) 441 1314
Fax: +1 (215) 230 7670
www.moria-surgical.com

Moria Japan K.K.

Arcadia Building 6F
1-12-3 Kanda
Sudacho Chiyoda-Ku Tokyo
101-0041
JAPAN
Phone: 81-3-6260-8309
Fax: 81-3-6260-8310
www.moriajapan.com

Moria Commercial (CHINA) CO., LTD.

上海目利亚贸易有限公司
Room H 6F Kaili Building NO.432
West Huai Hai Road, Changning
district, Shanghai, 200052, P.R.C
中国上海市长宁区淮海西路432号凯
利大厦6楼08室
Tel/Fax: +86 021 52586095
www.moria-surgical.com

