

# 後房微切口 手術

## 重要提示

遵循這些建議將有助於您維護自身器械的品質。不當維護與儲存將損壞您的器械。

### MORIA 後房微切口手術用遠端受控器械的資訊表

- 1** 器械隨 TefLon®/矽氧烷護具一併交付。在儲存和滅菌期間，應當在器械上保留這種護具。它應當在縮回位置中隨器械一起小心取下並應在清潔後立即放回。



- 2** 器械均在手柄上用貨號標記。貨號的最後三位數字還刻在器械活動部分的圓錐體上（例如：#19099/23 為 099 並且 #20004 為 004）。這三位元數位必須總是匹配刻在手柄上的最後三位元數字。手柄不可互換。

- 3** 遵循清潔方案 #I7IPT01 的建議。在每次手術後，器械必須立即按照以下方式消毒、清潔和清洗：

- 消毒：立即將器械浸沒在無醛去垢劑和消毒液中（浸沒持續時間依據生產商建議）。
- 清潔並清洗：
  - 擰鬆器械的末端，



- 將清潔連接器（設有器械）擰緊到器械的活動端上，



- 採用注射器，經魯爾鎖注入蒸餾水，



- 若可獲得，清潔並清洗矽氧烷抽吸管路，
- 用過濾的壓縮空氣吹幹套件，
- 將手柄擰回到器械活動部分的端頭上；如上文提到，通過匹配貨號，確信在正確手柄上擰緊，立即放回 TefLon®/矽氧烷護具。



可在 Moria 網站 [www.moria-surgical.com](http://www.moria-surgical.com) 的會員專區獲得清潔、消毒和滅菌方案。需要用戶名和密碼取得訪問權。

欲瞭解更多資訊

**MORIA SA**  
15, rue Georges Besse  
92160 Antony  
FRANCE  
電話: +33 (0)1 46 74 46 74  
傳真: +33 (0)1 46 74 46 00  
[www.moria-surgical.com](http://www.moria-surgical.com)



**MORIA Inc**  
1050 Cross Keys Drive  
Doylestown, PA 18902  
USA  
電話: (800) 441 1314  
傳真: +1 (215) 230 7670  
[www.moria-surgical.com](http://www.moria-surgical.com)

**Moria Japan K.K.**  
Arcadia Building 6F  
1-12-3 Kanda  
Sudacho Chiyoda-Ku Tokyo  
101-0041  
JAPAN  
電話: 81-3-6260-8309  
傳真: 81-3-6260-8310  
[www.morijapan.com](http://www.morijapan.com)

**Moria Commercial  
(CHINA) CO., LTD.**  
上海目利亚贸易有限公司  
Room H 6F Kaili Building NO.432  
West Huai Hai Road, Changning  
district, Shanghai, 200052, P.R.C  
中国上海市长宁区淮海西路432号凯  
利大厦6楼08室  
Tel/Fax: +86 021 52586095  
[www.moria-surgical.com](http://www.moria-surgical.com)

CE

**Moria**  
Ophthalmic Instruments