


Beehler 瞳孔擴張器的使用和維護


清潔和消毒說明

- 1 通過前向滑動拇指按鈕，伸長叉齒到最遠位置。

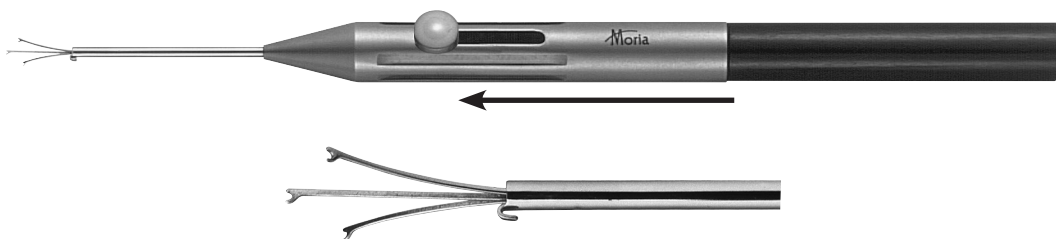

- 2 遵循清潔方案 #I7IPT01（在 www.moria-surgical.com 上或索取時可獲得）的建議，以按照以下階段實施雙重清潔：

- 手術後儘快立即浸沒器械，
- 第一次手工清潔，
- 自來水中清洗，
- 第二次浸沒在一種不同的浴液中，
- 第二次手工清潔，
- 在蒸餾、過濾或滲透的水中清洗：在兩個清洗階段期間，我們建議用前後運動方式移動

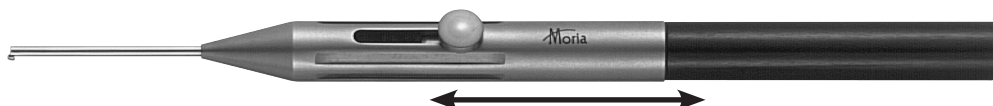

動拇指按鈕，


- 擦拭器械。

注意相關的 NCTA：由於器械的背塞 (back cork) 由鋁組成，不得使用蘇打溶液。這根背塞因此必須鬆開並根據一般方案清潔（參見方案 I7IPT01）。

- 3 用高壓蒸氣滅菌器（滅菌器使用熱蒸汽）按最低 134° C/273° F 在滅菌板上滅菌 18 分鐘。

可在 Moria 網站 www.moria-surgical.com 的會員專區獲得清潔、消毒和滅菌方案。需要用戶名和密碼取得訪問權。

遵循這些建議將有助於您維護自身器械的品質。不當維護與儲存可能損壞器械。

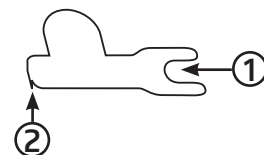

Beehler 瞳孔擴張器隨運輸期間使用的鎖緊裝置一併供應。使用前取下該裝置。為了鎖緊：將棘爪的齒 (1) 抵住把手放置並且在狹縫中夾緊末端 (2)。為了取下它，按反向順序進行。

這種防護是器械必需的。

CE


遵循這些建議將有助於您維護自身器械的品質。不當維護與儲存可能損壞器械。

器械在端頭上帶 Teflon®/ 矽氧烷保護帽時交付。這種保護帽必須永久留在器械上（寶庫滅菌和儲存期間）。保護帽必須在使用之前小心取下並在清潔後立即放回。


Beehler 瞳孔擴張器的使用和維護

卡鉤替換說明


- 1 將按鈕 C 盡可能向叉齒滑動。
用改錐擰鬆零件 D。切勿徹底擰鬆。
通過溫和牽引，取下零件 F。
用水清管 E 的內側。用過濾的壓縮空氣吹乾。

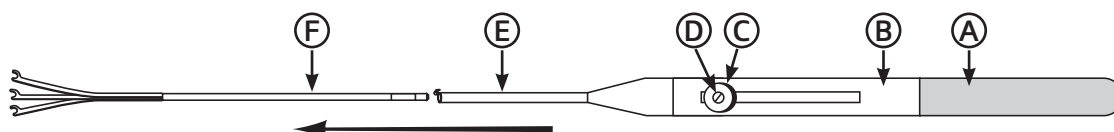

- 2 將新的零件 F（無叉齒的末端）插入零件 E。

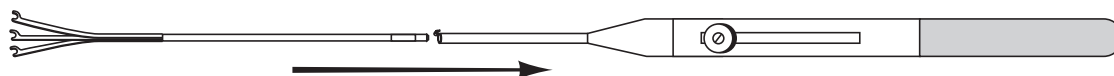

- 3 牢固握住按鈕 C 並且滑動零件 F 直至標記與管 E 的末端對齊。
阻塞螺釘 D。
前後滑動按鈕 C 以核實它是否恰當工作。

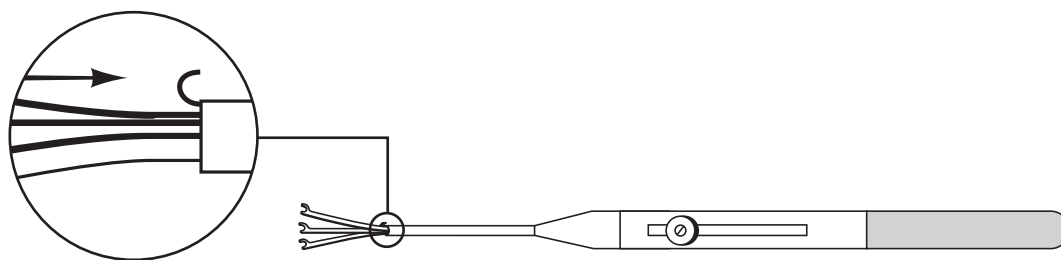

欲瞭解更多資訊

MORIA SA
15, rue Georges Besse
92160 Antony
FRANCE
電話: +33 (0)1 46 74 46 74
傳真: +33 (0)1 46 74 46 00
www.moria-surgical.com



MORIA Inc
1050 Cross Keys Drive
Doylestown, PA 18902
USA
電話: (800) 441 1314
傳真: +1 (215) 230 7670
www.moria-surgical.com

Moria Japan K.K.
Arcadia Building 6F
1-12-3 Kanda
Sudacho Chiyoda-Ku Tokyo
101-0041
JAPAN
電話: 81-3-6260-8309
傳真: 81-3-6260-8310
www.moriajapan.com

Moria Commercial (CHINA) CO., LTD.
上海目利亚贸易有限公司
Room H 6F Kaili Building NO.432
West Huai Hai Road, Changning
district, Shanghai, 200052, P.R.C
中国上海市长宁区淮海西路432号凯
利大厦6楼08室
Tel/Fax: +86 021 52586095
www.moria-surgical.com

CE

Moria
Ophthalmic Instruments