

# 清潔 Composite 器械 中腔隙的清潔方案

## 自來水清洗 步驟 1




最少 30 秒

## 手工清潔 步驟 2



浸沒中性 pH 清潔液中\*

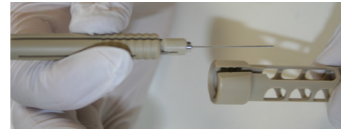

取下端頭護具  
啟動鑷機構 5 次



用軟刷清潔器械本體，不觸碰管或活動零件，直至已經移除所有可見污垢為止




管腔清潔




採用 5 ml 注射器和專用套管，用清潔液沖洗，每個管腔 5 次

## 如何取下和裝上端頭護具

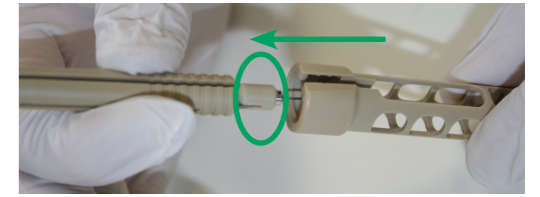


為了取下護具，擠壓並後移鑷子直至刀頭（圖片上的圓圈）退出為止。

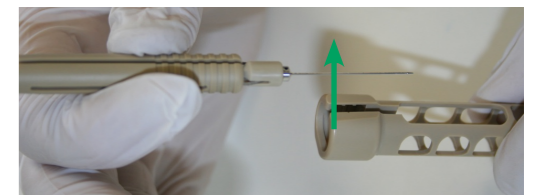

利用開口取出鑷子，不使其觸碰活動零件。按反向順序進行以放回護具。



放回護具時，確認鑷子良好定位。

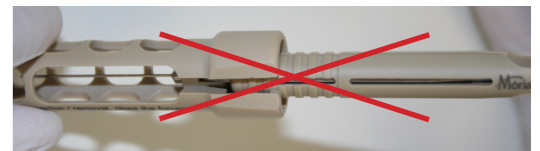

## 自來水清洗 步驟 3



最少 30 秒

## 超聲清洗器清潔 步驟 4



含乾淨中性 pH 清潔液的超聲清洗器超聲處理 5 分鐘

## 自來水清洗 步驟 5



最少 30 秒

## 清洗 步驟 6



採用 5 ml 注射器和專用套管，用脫礦質水沖洗\*



浸沒在脫礦質水中\*

## 乾燥 步驟 7

採用 5 ml 注射器和專用套管，用空氣沖洗，每個管套 5 次



用非織造無絨  
一次性布擦拭器械



用過濾的乾燥空氣乾燥

## 工具

#19149  
清潔用刷

注射器魯爾鎖 5 ml  
（更大的尺寸將使  
沖洗困難）

#61080  
清潔用套管

\*溫度 40° C / 104° F  
（切勿超過 45° C / 113° F）

欲瞭解更多資訊

MORIA SA  
15, rue Georges Besse  
92160 Antony  
FRANCE/ 法國  
電話: +33 (0) 1 46 74 46 74  
傳真: +33 (0) 1 46 74 46 70  
www.moria-surgical.com

