



#65109

繁體中文 OUP LC 環 (19187) 配套一次性使用人工前房 (19182) 和輸注套件 (19181)

重要提示：檢查小包裝完整性以及標籤上的有效日期。本醫療器械無菌且僅為一次性使用。這些醫療器械的設計絕不允許其重複使用。不應當將它們重複滅菌或重複使用。

欲選擇一次性 OUP LC 刀頭的適當組合，請參閱名為 #65090* 的文檔。
可在 Moria 網站：www.moria-surgical.com（受限區域-«Library» 標題）獲得本文檔的電子版。索取時，還可獲得單獨版本（封底上指示 Moria 的地址）。




目次

19182 人工前房基座，有 2 個端口（一個端口帶單通旋塞閥）、前房蓋和白色螺釘

19187 OUP LC 導引環和藍色螺釘

19181 輸注管路套件，由一根帶滴注室的靜脈輸液管、擴展管路和一根帶單通旋塞閥和注射器的短管組成


短管

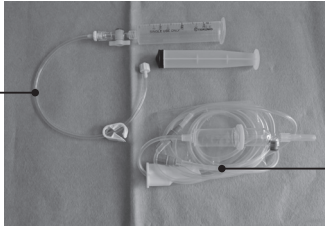

靜脈輸液管

從包裝取出所有零部件。
將人工前房的基座置於桌上並且確信它穩定。

準備管路在人工前房中獲得 90 mmHg 壓力：

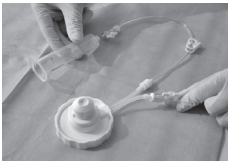

將短管接合至前房（結合至無旋塞閥的端口）。
確認 2 個旋塞閥是否開放。



用角膜保存介質或生理溶液（BSS 或類似溶液）充填注射器。



將注射器接合至短管。將一根手指置於柱塞頂端並其徹底充填管路（從短管至前房管路末端）。關閉前房旋塞閥。

在滴注室和人工前房頂部
中的液體之間的高度：約
1.20 m




將靜脈輸液瓶抬高到滴注室和人工前房頂部（角膜）之間的 1.20 m 高度，以確保獲得 90 mmHg 壓力。

將靜脈輸液瓶接合至靜脈輸液管。打開空氣閥。疏通管路，並使用滾輪關閉系統。

確認靜脈輸液管直至前房中不存在空氣泡。

將靜脈輸液管接合至前房旋塞閥並放開靜脈輸液管的滾輪，同時保持前房旋塞閥關閉。

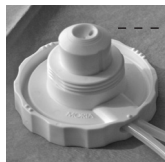

在人工前房上定位移植片：

建議：使用基質環具有 16 mm 最小直徑和角膜充分居中的移植片。

如果需要，向內皮施加內聚粘彈劑。



使用注射器向系統輸溫 and 注用角膜保存介質或 BSS。在柱塞的頂部定位供體植片，內皮向下。用鑷子略微提起植片，以除去可能的空氣泡。



使角膜在底座上精確居中並且將蓋小心放置就位（將銷釘插入槽中）。確認植片是否充分居中。

通過在蓋上安置白色鎖緊環，密封人工前房。

打開前房旋塞閥至少三秒。隨後，關閉前房旋塞閥以維持 90 mmHg 壓力。

確認 2 個旋塞閥是否關閉。

如果需要，用眼壓計檢查壓力。

捐贈移植片切制：

主要步驟：

- 移除上皮並使角膜表面乾燥
- 測量角膜厚度
- 如果需要，用眼壓計檢查壓力
- 將 OULC 刀頭的導引環置於蓋上並借助藍色螺釘擰緊它
- 用 AC 用 OUP 機頭和適當的 OULC 刀頭進行切制（參閱文檔 #65090）


取下移植片和處置器械：

一旦切製完成，擰鬆導引環。

為了防止移植片可能塌陷，打開前房旋塞閥，擰鬆白色螺釘，並且溫和地提起蓋，以握緊移植片。

移植片現準備好置於 Moria 穿孔器上以獲得所需的直徑。

在外科手術結束時，將一次性使用人工前房及其附件、OULC 刀頭和一次性使用管路棄入適宜的容器以處置（根據生效法規）。

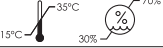 XXXXXX	目錄參考號
	數量
 YYYY/MM/DD	有效期
 XXXXXX	批號
 	使用環氧乙烷滅菌
	切勿重複使用
 XXXXXXX	生產商
 YYYY/MM/DD	生產日期
 XXXXXX	警示：查詢隨附文檔
 XXXXXX	查詢操作說明
	若包裝破損，切勿使用
	儲存條件： • 溫度：15° C – 35° C / 59° F – 95° F • 濕度比：30% – 70%
	保持乾燥
	丟棄於獨立的收集箱內：
	僅美國適用的警示：美國聯邦法律將本器械限於醫師銷售或訂購。

欲瞭解更多資訊

MORIA SA
15, rue Georges Besse
92160 Antony
FRANCE
電話：+33 (0)1 46 74 46 74
傳真：+33 (0)1 46 74 46 00
www.moria-surgical.com


0459

MORIA Inc
1050 Cross Keys Drive
Doylestown, PA 18902
USA
電話：(800) 441 1314
傳真：+ 1 (215) 230 7670
www.moria-surgical.com

Moria Japan K.K.
Arcadia Building 6F
1-12-3 Kanda
SudachoChiyoda-Ku Tokyo
101-0041
JAPAN
電話：81-3-6260-8309
傳真：81-3-6260-8310
www.moriajapan.com

Moria Commercial (CHINA) CO., LTD.
上海自利亞貿易有限公司
Room H 6F Kaili Building NO.432
West Huai Hai Road, Changning district ,Shanghai,200052 , P.R.C
中国上海市长宁区淮海西路432号凯利大厦6楼08室
Tel/Fax: +86 021 52586095
www.moria-surgical.com

