



# #65110

繁體中文 可重複使用器械指導 #65034 附錄  
及使用指導 #20033

## Can 單步驟散光標記器

欲選擇一次性 OULC 刀頭的適當組合，請參閱名為 #65090\* 的文檔。

可在 Moria 網站：[www.moria-surgical.com](http://www.moria-surgical.com)（受限區域«Library» 標題）獲得本文檔的電子版。索取時，還可獲得單獨版本（封底上指示 Moria 的地址）。

### 預期用途

Can\* 鐘擺式標記器 (#20033) 意在術前時間對患者的眼標記選定的角度軸位元。它用於定位散光人工晶狀體。


### 準確度

Can 鐘擺式標記器的準確度是  $\pm 1.5^\circ$ 。

### 選擇角度



- 1- 擰鬆擺杆半圓。
- 2- 通過移動撥盤上的箭頭選擇角度。
- 3- 擰緊擺杆直至它止住。

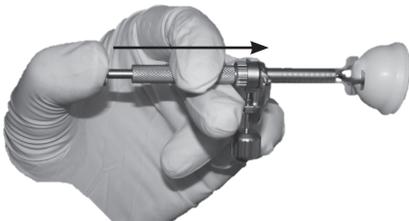

切勿在相同側面斜置定心端和軸位元標記器。

替代性定位是，用中指和拇指握住手柄並使用指數擋住擺杆。

\* E. Can, MD, 薩姆松, 土耳其



- ① 樞杆
- ② 手柄
- ③ 擺杆和撥盤
- ④ 軸位元標記器
- ⑤ 定心端

維護

關於維護、清潔和滅菌，請參閱可複用器械說明 #65034。酌情，器械可以如下文所示那樣拆卸或重裝配。


拆解

步驟 1



同時握住零件①和⑤並通過反時針轉動零件③擰鬆之。

步驟 2

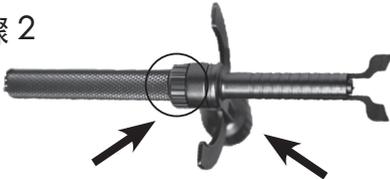

擰鬆來自零件③的零件②。  
查看包圍的區域以擰鬆零件②。

步驟 3



擰鬆零件③的擺杆（僅 2 圈）並拆卸來自零件③的零件④。

請注意，您必須按反向順序進行，以重裝配器械

欲瞭解更多資訊

**MORIA SA**  
15, rue Georges Besse  
92160 Antony  
FRANCE  
電話：+33 (0)1 46 74 46 74  
傳真：+33 (0)1 46 74 46 00  
[www.moria-surgical.com](http://www.moria-surgical.com)

0459

**MORIA Inc**  
1050 Cross Keys Drive  
Doylestown, PA 18902  
USA  
電話：(800) 441 1314  
傳真：+1 (215) 230 7670  
[www.moria-surgical.com](http://www.moria-surgical.com)

**Moria Japan K.K.**  
Arcadia Building 6F  
1-12-3 Kanda  
SudachoChiyoda-Ku Tokyo  
101-0041  
JAPAN  
電話：81-3-6260-8309  
傳真：81-3-6260-8310  
[www.morijapan.com](http://www.morijapan.com)

**Moria Commercial (CHINA) CO., LTD.**  
上海自利亞貿易有限公司  
Room H 6F Kaili Building NO.432  
West Huai Hai Road, Changning district, Shanghai, 200052, P.R.C  
中国上海市长宁区淮海西路432号凯利大厦6楼08室  
Tel/Fax: +86 021 52586095  
[www.moria-surgical.com](http://www.moria-surgical.com)

