



用於建立超薄角膜板層移植物的 CBSU 刀頭選擇

選擇合適的一次性 CB 刀頭組合對於建立超薄移植體至關重要。

皮瓣厚度，因此移植體的厚度受若干病患相關因素的影響，例如角膜解剖構造、K 讀數、角膜厚度、組織品質、供體年齡、角膜水腫、眼內壓與角膜儲存介質，以及手術相關因素，包括角膜水化與推進速度。

超音波角膜厚度測量並不總是準確，並且可能隨著外科醫生的技術與器械的校準而變化。

刀頭標籤表示刀片的刀刃至刀頭前板之間的距離。MORIA 只能保證刀頭的尺寸特徵，而不能保證手術效果。

以下數值基於按照指導使用刀頭及 Moria 一次性人工腔室、充氣管與 CB 微型角膜刀，並設定系統壓力設置為 90 毫米汞柱而獲得。

這僅是一般性指導。Moria 建議每個使用非移植性角膜組織的使用者在進行實際手術前確定自己的參考表。

第 1 次推進時間為 4-5 秒		
角膜厚度	刀頭	預期皮瓣厚度±標準差
550 微米或以上	350	440 ± 40
	300	340 ± 40
	250	310 ± 30
	200	220 ± 30
<550 微米	350	400 ± 40
	300	300 ± 40
	250	270 ± 30
	200	200 ± 30

第 2 次推進時間至少為 7 秒		
角膜厚度	刀頭	預期皮瓣厚度±標準差
<550 微米	130	135 ± 25
	110	120 ± 20
	90	100 ± 20
	50	75 ± 20

欲瞭解更多資訊

MORIA SA
15, rue Georges Besse
92160 Antony
法國
電話：+33 (0) 1 46 74 46 74
傳真：+33 (0) 1 46 74 46 00
www.moria-surgical.com



MORIA Inc
1050 Cross Keys Drive
Doylestown, PA 18902
美國
電話：(800) 441 1314
傳真：+1 (215) 230 7670
www.moria-surgical.com

Moria Japan K.K.
Arcadia Building 6F
1-12-3 Kanda
Sudacho Chiyoda-Ku Tokyo
101-0041
JAPAN
Phone: 81-3-6260-8309
Fax: 81-3-6260-8310
www.moriajapan.com

Moria Commercial (CHINA) CO., LTD.
上海目利亞貿易有限公司
Room H 6F Kaili Building NO.432
West Huai Hai Road, Changning district, Shanghai, 200052, P.R.C
中国上海市长宁区淮海西路432号凯利大厦6楼08室
Tel/Fax: +86 021 52586095
www.moria-surgical.com

