


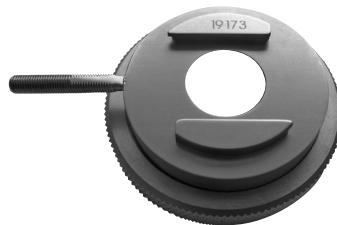

#19173

繁體中文 用戶手冊附錄 #65009



除了用於 ONE (#19164) 與 CBM (#19171) 的在配有通用腔室蓋 (#19162) 的 ALTK 人工腔室 (#19161) 上導引微型角膜刀頭的導引環，Moria 通告了配合用於人工腔室 (#19184/xxx) 的一次性大切口 (OU LC) 刀頭與用於人工腔室 (#19173) 的 One Use-Plus (OUP) 機關使用的新導引環的可用性。

1-適應症

由用於 ALTK 腔室 (#19173) 的 OUP 導引環導引的用於人工腔室 (#19184/xxx) 的 OU LC 刀頭，配合用於人工室 (#19175) 的 OUP 機頭能夠在角膜移植手術期間透過自動運動製備供體移植植物，進行完全板層切除（無鉸鏈）。

2-產品號與名稱

- 產品號：#19173
- 名稱：可重複使用 OUP ALTK 導引環

3-使用說明

1/ 卸下通用腔室上的螺母 (#19162)，（圖 1 與圖 2）

2/ 設定 OUP ALTK 導引環 (#19173)

3/ 將 OUP 導引環 (#19173) 擰到通用腔室 (#19162) 上，直至其被鎖定（圖 3）

有關 Evo3e 控制裝置與人工腔的設定，移植植物定位，刀頭準備，移植植物切割與結束手術的資訊，請參閱刀頭 #19184/xxx 盒中隨附的使用說明 #65090。

4-維護

有關 OUP 導引環 (#19173) 的維護，請參閱用戶手冊 #65009 中提及的導牙環維護。

圖 1

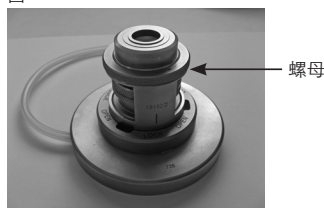


圖 2



圖 3



To obtain more information

MORIA SA
15, rue Georges Besse
92160 Antony
FRANCE
Phone: +33 (0)1 46 74 46 74
Fax: +33 (0)1 46 74 46 00
www.moria-surgical.com



MORIA Inc
1050 Cross Keys Drive
Doylestown, PA 18902
USA
Phone: (800) 441 1314
Fax: +1 (215) 230 7670
www.moria-surgical.com

Moria Japan K.K.
Arcadia Building 6F
1-12-3 Kanda
SudachoChiyoda-Ku Tokyo
101-0041
JAPAN
Phone: 81-3-6260-8309
Fax: 81-3-6260-8310
www.moriajapan.com

Moria Commercial (CHINA) CO., LTD.
上海自利亞貿易有限公司
Room H 6F Kaili Building NO.432
West Huai Hai Road, Changning
district, Shanghai, 200052, P.R.C
中国上海市长宁区淮海西路432号凯利大厦6楼08室
Tel/Fax: +86 021 52586095
www.moria-surgical.com

Moria
Ophthalmic Instruments