


Information sheet for mounting the CB Single-Use head
Not for patient/only for donor graft.

Notice de montage de la tête CB Single-Use**Ne pas utiliser sur patient/uniquement pour greffon donneur.**



#19178/XXX

IMPORTANT**Contents****Composition du Pack***Microkeratome head with blade**Tête de microkératome avec sa lame*

Blade
Lame

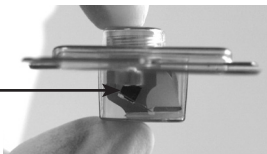

- 1** Remove inner plastic pack from outer peel pouch.
Retirer le pack du sachet protecteur.
- 2** Place pack with blade side down.
Placer le pack de façon à ce que le côté de la lame soit en bas.
- 3** Remove top of pack.
Ouvrir la partie supérieure du pack.

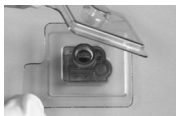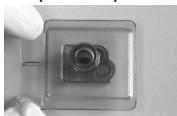

- 4** Check the caliber of the desired head (marked on the back of the head).
Vérifier le calibre de la tête désirée (marqué sur l'arrière de la tête).



- 5** Keep head in pack while screwing into turbine.
En maintenant la tête dans le pack, la visser sur la turbine.



CHECK FOR
UNDAMAGED AND
UNOPENED PACK.
THIS PACK IS
STERILE AND FOR
SINGLE USE.

READ THE MORIA CB
MICROKERATOME
USER MANUAL
CAREFULLY. #65078

VÉRIFIER
L'INTÉGRITÉ DU
SACHET PROTECTEUR
INDIVIDUEL
DE STÉRILITÉ
AVANT USAGE.
CE PACK EST
STERILE ET À
USAGE UNIQUE.

VOIR LES
CONSIGNES
D'UTILISATION
DÉTAILLÉES ET LES
AVERTISSEMENTS
FIGURANT DANS LE
MANUEL UTILISATEUR
DU MICROKERATOME
CB. #65078



Caution : U.S.
(FEDERAL) Law
restricts this device
to sale by or on the
order of a physician

- 6** While assembled, inspect blade under microscope. Lubricate the blade and head with BSS.

Après l'assemblage, inspecter la lame au microscope.
Humidifier la lame et la tête avec du sérum physiologique ou toute autre solution ophtalmique.

- 7** Activate turbine to check that blade is engaged and oscillates.

Activer la turbine afin de vérifier que la lame est bien engagée et oscille correctement.

- 8** Proceed to the cut of the graft on the MORIA reusable artificial chamber or the MORIA single-use artificial chamber.

Procéder à la découpe du greffon sur la chambre artificielle MORIA réutilisable ou sur la chambre artificielle MORIA à usage unique.



- 9** After use, place the head back in the packaging and unscrew it. Discard everything into an appropriate container for disposal (according to the regulations in force).

Après usage, remettre la tête dans le pack et dévisser la tête.
Placer tous les éléments dans un conteneur approprié pour destruction (selon la réglementation en vigueur).



WARNING

Use the CB Single Use heads exclusively with accessories manufactured by Moria for the CB microkeratome; use of other accessories can damage the microkeratome and may cause significant patient injuries. Please read the user manual of the Moria CB microkeratome before use.

AVERTISSEMENT : N'utiliser les têtes CB Single Use qu'avec les différents éléments fournis par MORIA pour le microkératome CB; l'emploi de tout autre élément que ceux fournis par MORIA risquerait d'endommager le microkératome et d'être cause de graves blessures pour le patient. Il est impératif de se reporter au mode d'emploi pour l'utilisation du microkératome.

Document Aietiq - Rev. D-05.2023 (Validée)

Moria

MORIA#65076-D-05.2023

MORIA SA

27, rue du Pied de Fourche
03160 Bourbon
l'Archambault
FRANCE
Phone: +33 (0) 4 70 67 09 04
Fax: +33 (0) 4 70 67 06 61
www.moria-surgical.com



MORIA Inc

1050 Cross Keys Drive
Doylestown, PA 18902
USA
Phone: (800) 441 1314
Fax: +1 (215) 230 7670
www.moria-surgical.com

Moria Japan K.K.

Arcadia Building 6F
1-12-3 Kanda
Sudacho Chiyoda-Ku
Tokyo 101-0041
JAPAN
Phone: 81-3-6260-8309
Fax: 81-3-6260-8310
www.moriajapan.com