




## A - 將機頭裝配在刀頭上

### 目次

帶分離器的一次性使用上皮角膜刀刀頭

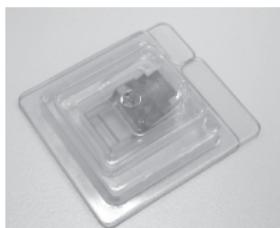


1 從外皮袋取出塑膠內包裝

2 將包裝在刀片螺釘向下放置 (1) 並且打開包裝的上部 (2)



1

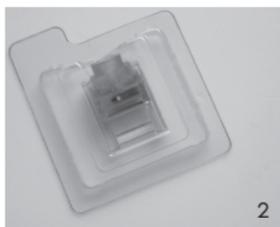

2


3 順時針擰緊鎖緊螺釘，以固定刀頭於機頭上。核實刀頭是否與機頭牢固擰緊。不應存在刀頭轉動 (3-4-5)



3



4

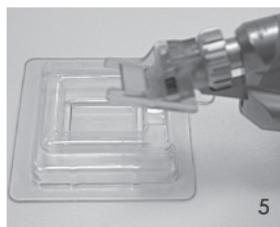

5


4 一旦裝配好，顯微鏡下視檢分離器。

5 使用前，用 BSS® (Alcon 的商標) 或另一種適宜溶液潤滑 EPI-K™ 分離器。

6 啟動機頭以檢查分離器是否恰當接合並振動

## B - 將機頭裝配在吸環上

1

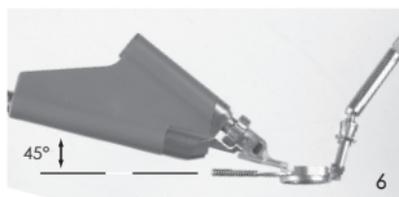

在吸環的導軌中插入刀頭時，機頭應當距吸環的金屬螺紋軸呈 45 度角，以防止軸觸碰刀頭和分離器組合體 (6)。



一旦刀頭完全插入吸環的導軌中，柔和減少 45° 角至 0° 並將刀頭略微推入吸環 (7)。

2





警告!切勿用螺紋軸觸碰分離器 (如以下圖片中所示)，這將會損壞分離器的邊緣 (8)。



## C - 拆卸 EPI-K 一次性使用刀頭

欲拆卸 EPI-K™ 一次性使用刀頭，將它插入包裝並反時針擰松鎖緊螺釘。將一切東西丟棄在生物危害容器中 (9-10-11)。

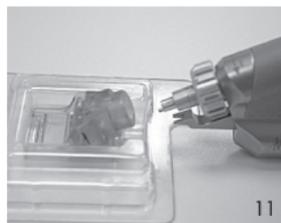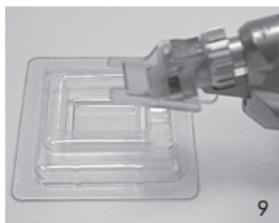

# EPI-K™ SYSTEM

- EPI-K™ 機頭 (綠色)
- EPI-K™ 刀頭 (綠色盒貼紙)
- EPI-K™ 吸環 (EPI-K 標示和綠色止動)


Epi-K 環 標示




## 警告/ 注意

- OUP 機頭 (藍色)
- OUP 刀頭 (藍色盒貼紙)
- OUP 吸環 (OUP 標示和藍色止動)
- OUP 一次性使用刀頭和環套件 (藍色盒貼紙)


### EPI-K™ SYSTEM

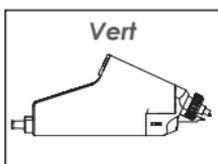

Ref.: 19342

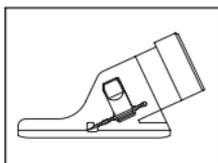


Ref.: 19390

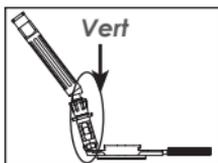


Ref.: 19389


### OUP 系統

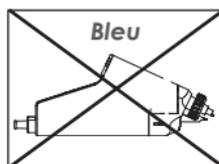

Ref.: 19345

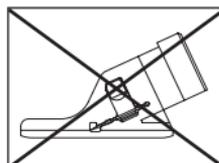

Ref.: 19393  
19336  
19337

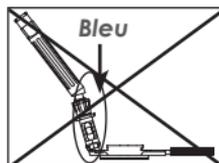

Ref.: 19391



#### To obtain more information

**MORIA SA**

15, rue Georges Besse  
92160 Antony  
FRANCE  
Phone: +33 (0)1 46 74 46 74  
Fax: +33 (0)1 46 74 46 00  
[www.moria-surgical.com](http://www.moria-surgical.com)

**MORIA Inc**

1050 Cross Keys Drive  
Doylestown, PA 18902  
USA  
Phone: (800) 441 1314  
Fax: + 1 (215) 230 7670  
[www.moria-surgical.com](http://www.moria-surgical.com)

**Moria Japan K.K.**

Arcadia Building 6F  
1-12-3 Kanda  
SudachoChiyoda-Ku Tokyo  
101-0041  
JAPAN  
Phone: 81-3-6260-8309  
Fax: 81-3-6260-8310  
[www.moriajapan.com](http://www.moriajapan.com)

**Moria Commercial  
(CHINA) CO., LTD.**

上海目利亚贸易有限公司  
Room H 6F Kailli Building NO.432  
West Huai Hai Road, Changning  
district, Shanghai, 200052 . P.R.C  
中国上海市长宁区淮海西路432号凯  
利大厦6楼08室  
Tel/Fax: +86 021 52586095  
[www.moria-surgical.com](http://www.moria-surgical.com)