

ZH-TW - 帶金屬環的 One Use-Plus 的參考表



水平 K	環	阻器	角膜角膜瓣直徑 (假設值)	可用於消融的基 質 (計算值)	連接側大小 (計算值)
39	-1 0	8 7.5	9.5 9.0	8.8 8.3	5.1 5.0
40	-1 0	8 7.5	9.8 9.3	8.9 8.4	5.6 5.4
41	-1 0 1	8.5 8 7.5	10.0 9.5 9.0	9.3 8.8 8.3	5.3 5.1 5.0
42	-1 0 1	8.5 8 7.5	10.3 9.8 9.3	9.4 8.9 8.4	5.7 5.6 5.4
43	0 1 2	8.5 8 7.5	10.0 9.5 9.0	9.3 8.8 8.3	5.3 5.1 5.0
44	0 1 2	8.5 8 7.5	10.3 9.8 9.3	9.4 8.9 8.4	5.7 5.6 5.4
45	1 2 3	8.5 7.5 7.5	10.0 9.5 9.0	9.3 8.5 8.3	5.3 5.8 5.0
46	2 3	8 7.5	9.8 9.3	8.9 8.4	5.6 5.4
47	2 3	8.5 8	10.0 9.5	9.3 8.8	5.3 5.1
48	2 3	8.5 8	10.3 9.8	9.4 8.9	5.7 5.6
49	3	8.5	10.0	9.3	5.3

MORIA #65067ZH-TW-A-09.2020  0459

測定水平 K，修約該值至最近的整數：並選擇適當的環和阻器（對於 $42.5 < K < 43.5$ ，修約至 43）。
使環在角膜緣上居中。


對於直徑大於 12 mm 的角膜，選擇針對該角膜曲率量值推薦的最小號環（對於水平 K 為 43 者，選擇 0）。
對於直徑小於 11 mm 的角膜，選擇針對該角膜曲率量值推薦的最大號環（對於水平 K 為 43 者，選擇 +2）。

取決於若干患者相關因素（IOP、近視度數、年齡、性別、族裔、角膜曲率量值等）和手術相關因素（角膜水化狀態、抽吸時間等），性能可以偏離參考表。參考表僅是一般指導。強烈建議每位外科醫生設立自身的參考表。Moria 不應當對任意方遭受的任何直接、意外、後續損害或示範性損害負責，即使尚未向該方告知這類損害的可能性，也是如此。



使用參考表

1. 直徑在 11.0 和 12.0 mm 之間的角膜。
隨水平角膜曲率量值的變化選擇吸環規格和阻器值。遵循例子，修約水平 K 值至最近的整數：
如果 $42.5 \leq \text{水平 K} < 43.5$ ，修約至 43
2. 直徑 < 11.0 或 > 12.0 mm 的角膜需要修正參考表值。
角膜直徑影響角膜瓣直徑。與大眼相比，小眼的更多角膜組織將經吸環鼓出。對於相同的環和角膜曲率量值，在小眼上獲得的角膜瓣直徑將大於大眼上獲得的角膜瓣直徑。
 - 小角膜 < 11.0 mm：根據以下例子，選擇針對該角膜曲率量值推薦的最大號環：對於水平 K 為 43 者，選擇 +2。
 - 大角膜 > 12.0 mm：根據以下例子，選擇針對該角膜曲率量值推薦的最小號環：對於水平 K 為 43 者，選擇 0。

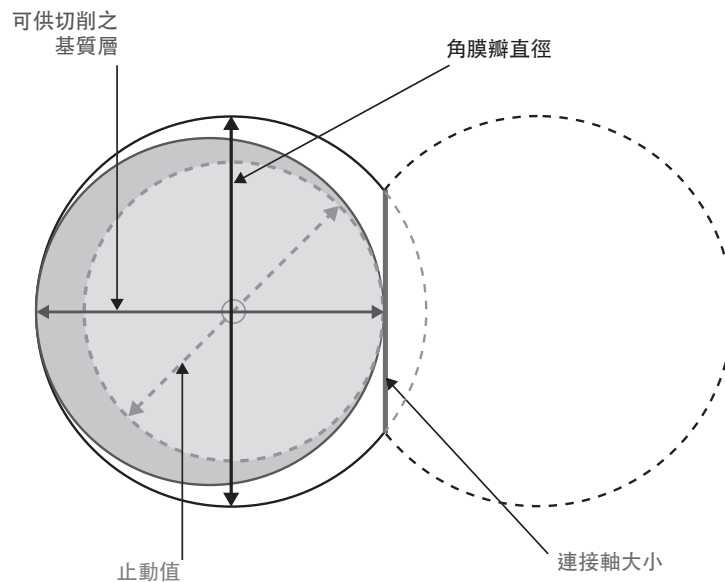

Moria 不建議 One Use-Plus 用於角膜厚度小於 500 微米的眼。

Moria 建議使吸環在角膜緣上居中。

Moria 建議使用速度 2。

MORIA 網站上可獲得最新版參考表：<http://www.moria-surgical.com>