



保留上皮瓣的 Epi-LASIK

環選擇

- 對於正常眼或小眼（角膜直徑長至 11.5 mm）的近視治療，選擇 -1、0 或 +1 吸環。使用更高的環值將減小上皮切除的直徑達 0.1 mm。
- 對於遠視治療、需要巨大消融區（波前像差導引，大瞳孔）的治療或大眼（角膜直徑 > 11.5 mm），選擇 LD（大直徑）吸環。

針對任一環的阻器選擇

- 若平均 K < 43.5 D，選擇 7.5 阻器
- 若平均 K > 43.5 D，選擇 8.0 阻器

丟棄上皮瓣的 Epi-LASIK

環和阻器選擇

- 對於正常眼或小眼（角膜直徑長至 11.5 mm）的近視治療，為鼻側偏心的所有病例選擇帶 9.0 止動的 -1、0 或 +1 吸環，旨在獲得游離角膜瓣。為了正確偏心，允許 0.5 mm 鞏膜穿環顯示。使用更高的環值將減小上皮切除的直徑達 0.1 mm。
- 對於遠視治療、需要巨大消融區的治療或大眼（角膜直徑 > 11.5 mm），選擇帶 9.5 阻器的 LD（大直徑）吸環。

取決於若干患者相關因素（IOP、近視度數、年齡、性別、族裔、角膜曲率量值等）和手術相關因素（角膜水化狀態、吸壓時間等），性能可能偏離指南。指南僅是一般指導。強烈建議每位外科醫生設立自身的列線圖。Moria 不應當對任意方遭受的任何直接、意外、後續損害或示範性損害負責，即使尚未向該方告知這類損害的可能性，也是如此。

To obtain more information

MORIA SA
15, rue Georges Besse
92160 Antony
FRANCE
Phone: +33 (0)1 46 74 46 74
Fax: +33 (0)1 46 74 46 70
www.moria-surgical.com

Moria Japan K.K.
Arcadia Building 6F
1-12-3 Kanda
SudachoChiyoda-Ku Tokyo
101-0041
JAPAN
Phone: 81-3-6260-8309
Fax: 81-3-6260-8310
www.morijapan.com

欲獲得更多資訊

**Moria Commercial
(CHINA) CO., LTD.**
上海目利亞貿易有限公司
Room H 6F Kaiji Building NO.432
West Huai Hai Road, Changning
district, Shanghai, 200052, P.R.C
中国上海市长宁区淮海西路432号凯
利大厦6楼08室
Tel/Fax: +86 021 52586095
www.moria-surgical.com



保留上皮瓣的 Epi-LASIK

對於正常眼或小眼（角膜直徑長至 11.5 mm）的近視治療，選擇帶以下止動的 -1 或 0 吸環。

- ▶ 對於平均 K < 43.5 D，7.5 止動
- ▶ 對於平均 K > 43.5 D，8.0 止動

相比相同眼上使用“-1”環，使用“0”環值將減小上皮切除的直徑達 0.1 mm。

對於大眼（角膜直徑 > 11.5 mm），選擇帶 7.5 止動的 -1 吸環。

丟棄上皮瓣的 Epi-LASIK

為鼻側偏心的所有病例選擇帶 9.5 的 -1 或 0 吸環，旨在獲得游離角膜瓣。

相比相同眼上使用“-1”環，使用“0”環值將減小上皮切除的直徑達 0.1 mm。

取決於若干患者相關因素（IOP、近視度數、年齡、性別、族裔、角膜曲率量值等）和手術相關因素（角膜水化狀態、抽吸時間等），性能可能偏離指南。指南僅是一般指導。強烈建議每位外科醫生設立自身的列線圖。Moria 不應當對任意方遭受的任何直接、意外、後續損害或示範性損害損害負責，即使尚未向該方告知這類損害的可能性，也是如此。

To obtain more information

MORIA SA
15, rue Georges Besse
92160 Antony
FRANCE
Phone: +33 (0)1 46 74 46 74
Fax: +33 (0)1 46 74 46 70
www.moria-surgical.com

Moria Japan K.K.
Arcadia Building 6F
1-12-3 Kanda
SudachoChiyoda-Ku Tokyo
101-0041
JAPAN
Phone: 81-3-6260-8309
Fax: 81-3-6260-8310
www.moriajapan.com

欲獲得更多資訊

**Moria Commercial
(CHINA) CO., LTD.**
上海目利亚贸易有限公司
Room H 6F Kaiji Building NO.432
West Huai Hai Road, Changning
district, Shanghai, 200052, P.R.C
中国上海市长宁区淮海西路432号凯
利大厦6楼08室
Tel/Fax: +86 021 52586095
www.moria-surgical.com