



環和阻器選擇

- 對於正常眼或小眼（角膜直徑長至 11.5 mm）的近視治療，為鼻側偏心的所有病例選擇帶 9.0 止動的 -1、0 或 +1 吸環，旨在獲得游離角膜瓣。為了正確偏心，允許 0.5 mm 鞏膜穿環顯示。使用更高的環值將減小上皮切除的直徑達 0.1 mm。
- 對於遠視治療、需要巨大消融區的治療或大眼（角膜直徑 > 11.5 mm），選擇帶 9.5 止動的 LD（大直徑）吸環。

取決於若干患者相關因素（IOP、近視度數、年齡、性別、族裔、角膜曲率量值等）和手術相關因素（角膜水化狀態、吸壓時間等），性能可能偏離指南。指南僅是一般指導。強烈建議每位外科醫生設立自身的參考表。Moria 不應當對任意方遭受的任何直接、意外、後續損害或示範性損害負責，即使尚未向該方告知這類損害的可能性，也是如此。