


繁體中文 用戶手冊附錄 #65022

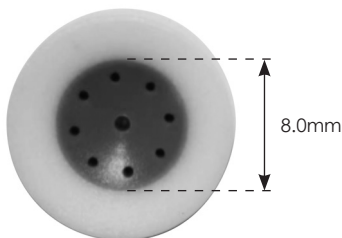

除了 Teflon® 移植井（產品號 #17171P）之外，Moria 還提供了新的雙色 Teflon®/Propylux® 移植井（產品號 #17171PB），以方便供體鈕狀體對中。
內部綠色部分的直徑為 8.0 毫米

1-預期用途：

- Hanna 沖頭用於執行預定直徑的供體鈕狀體。
- 移植井用於在切割期間保持供體鈕狀體。Teflon® 移植井的預期用途沒有變化（產品號 #17171P）

3-維護：

- 與 Teflon® 移植井（產品號 #17171P）一樣，必須在使用前檢視井表面的狀況。
-  若過度劃傷應予以更換，以防止顆粒形成，並且至少在 10 次使用後予以更換。
- 井的更換與 Teflon® 移植井（產品號 #17171P）一樣。

2-產品號與名稱：

- 產品號：#17171PB
- 名稱：用於沖頭的雙色砧板

有關器械使用、清潔消毒與滅菌的其他資訊，請參閱用戶手冊 #65022。

MORIA #65098ZH-TW-A-09.2020

欲瞭解更多資訊

MORIA SA
15, rue Georges Besse
92160 Antony
法國
電話：+33 (0) 1 46 74 46 74
傳真：+33 (0) 1 46 74 46 00
www.moria-surgical.com



MORIA Inc
1050 Cross Keys Drive
Doylestown, PA 18902
美國
電話：(800) 441 1314
傳真：+1 (215) 230 7670
www.moria-surgical.com

Moria Japan K.K.
Arcadia Building 6F
1-12-3 Kanda
SudachoChiyoda-Ku Tokyo
101-0041
JAPAN
Phone: 81-3-6260-8309
Fax: 81-3-6260-8310
www.moriajapan.com

Moria Commercial (CHINA) CO., LTD.
上海目利亞貿易有限公司
Room H 6F Kaili Building NO.432
West Huai Hai Road, Changning district, Shanghai, 200052, P.R.C
中國上海市長宁区淮海西路432號凱利大廈6樓08室
Tel/Fax: +86 021 52586095
www.moria-surgical.com