



## 使用指南 ONE® 次性冲压刀 #17200DXXX

### 使用说明

Moria ONE® 系列的一次性冲压刀是用来完成层分和穿透角膜手术中角膜植片的。

### 装置部件

- 切割底座 (A), (见图. 1)
- 环钻刀片 (B), (见图. 1)
- 针筒 (C)(图.1)

最新版本的资料及翻译本可以在 Moria 网站(<http://www.moria-surgical.com>)得到，需要注册。

### 警告

- 本说明书仅解释如何使用此医疗器械，并没有描述如何制作角膜植片的具体步骤。手术步骤可以按医生制作角膜植片的经验来完成。
- 检查包装袋的完整性。
- 检查包装上的有效期。
- ONE® 一次性负压冲压刀是已灭菌并供使用的。如果独立包装袋有破损，是不能被使用的。
- 此医疗器械是不允许被重复使用的。重复使用该器械，会影响临床表现以及将危及病人。

### 指南

- 1 / 检查标注在顶部的环钻刀片的直径。
  - 2 / 从袋装中移除灭菌泡。
  - 3 / 从包装袋中拿出底座，环钻刀片和针筒。
  - 4 / 用管子连接针筒，用 Luer™锁(图 2)。
  - 5 / 在显微镜下检查环钻刀片的完整性。
  - 6 / 按压针筒活塞一半并且保持。
  - 7 / 放置植片在底座上，内皮面向上。
  - 8 / 使用底座4定位点使得植片在中心位置。
  - 9 / 释放活塞产生负压，以便使得植片在中心位置。检查植片的位置是否在中心。如果位置有偏离，重新操作步骤6-9。
  - 10 / 将环钻刀片放置在底座上，使得刀片仅因重力而下降，避免造成错误切割角度（有阻滞的风险）（图 3），并且按压切割角膜植片（图4）。
 

一边握住冲压刀，通过顶部的可视窗口用齿镊抓取巩膜，轻轻旋转完成切割（图 5）。
  - 11 / 轻轻地从底座上拿起环钻刀片。由于负压吸力，供体植片应该在底座上。然后完全移开环钻刀片。
  - 12 / 松开针筒连接，释放负压。供体植片可以备用了。
  - 13 / 在最后的步骤里，将环形刀片丢弃到适当的回收器皿中。
- (根据相关法律)

产品编号列表

| 产品编号17200Dxxx |                   |
|---------------|-------------------|
| 17200D600     | 一次性冲压刀 D600       |
| 17200D650     | 一次性冲压刀 D650       |
| 17200D675     | 一次性冲压刀 D675       |
| 17200D700     | 一次性冲压刀 D700       |
| 17200D725     | 一次性冲压刀 D725       |
| 17200D750     | 一次性冲压刀 D750       |
| 17200D775     | 一次性冲压刀 D775       |
| 17200D800     | 一次性冲压刀 D800       |
| 17200D825     | 一次性冲压刀 D825       |
| 17200D850     | 一次性冲压刀 D850       |
| 17200D875     | 一次性冲压刀 D875       |
| 17200D900     | 一次性冲压刀 D900       |
| 17200D950     | 一次性冲压刀 D950       |
| 包装            | 每盒一个，环氧乙烷灭菌，一次性使用 |

图 1

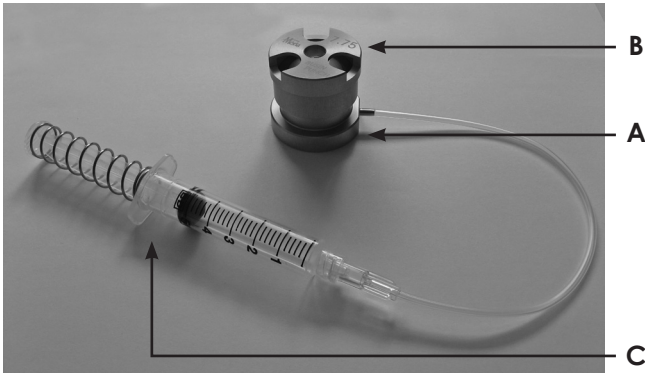


图 3



图 4

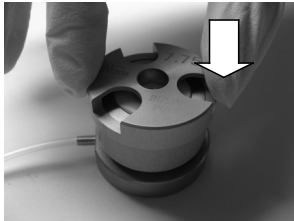


图 2



图 5



注册人/生产企业: MORIA S.A 法国目利亚股份有限公司  
住所: 15, rue Georges Besse, F92160 Antony, France  
生产地址: 15, rue Georges Besse, F92160 Antony, France  
联系电话: +33 (0)1 46 74 46 74 传真: +33 (0)1 46 74 46 00

代理人/售后服务单位: 上海目利亚贸易有限公司  
住所: 上海市长宁区淮海西路432号6楼H室  
联系方式: 86 021 52586095

医疗器械注册证编号/产品技术要求编号: 国械注进20173166477

生产日期: 见标签  
使用期限: 见主机说明书

欲了解更多资讯

**MORIA SA**  
15, rue Georges Besse  
92160 Antony  
法国  
电话: +33 (0)1 46 74 46 74  
传真: +33 (0)1 46 74 46 00  
[www.moria-surgical.com](http://www.moria-surgical.com)



**MORIA Inc**  
1050 Cross Keys Drive  
Doylestown, PA 18902  
USA  
电话: (800) 441 1314  
传真: +1 (215) 230 7670  
[www.moria-surgical.com](http://www.moria-surgical.com)

**Moria Japan K.K.**  
Arcadia Building 6F  
1-12-3 Kanda  
SudachoChiyoda-Ku Tokyo  
101-0041  
日本  
电话: 81-3-6260-8309  
传真: 81-3-6260-8310  
[www.moriajapan.com](http://www.moriajapan.com)

**Moria Commercial  
(CHINA) CO., LTD.**  
上海目利亚贸易有限公司  
Room H 6F Kaili Building NO.432  
West Huai Hai Road, Changning  
district, Shanghai, 200052, P.R.C  
中国上海市长宁区淮海西路432号凯  
利大厦6楼H室  
Tel/Fax: +86 021 52586095  
[www.moria-surgical.com](http://www.moria-surgical.com)

**Moria**  
Ophthalmic Instruments